

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 트레이(Tray)가 손상되거나 개봉되었는지 확인을 위해 외관을 검사한다.
주의 : 보호용 트레이 또는 뚜껑(lid)이 손상되었거나 개봉되었다면 트레이를 상자에 다시 넣어 제조자에게 반송한다.
- 2) 본 제품은 멸균 제품이므로 외부 트레이 뚜껑(tray lid)의 구석을 벗긴 후 멸균된 겔 주입기구(gel syringe)를 포함하고 있는 내부 트레이를 꺼내어 무균 장소에서 시술자에게 제공한다.
- 3) 시술전 의사는 환자에게 본 제품의 적응증, 금기사항, 부작용등에 대해 충분히 설명하고 반드시 환자의 상태를 확인한다.

나. 사용방법

- 1) 본 제품의 적용부위를 소독액으로 깨끗이 닦아낸다. 단, 감염된 상처에 소독액을 사용하는 경우 소독액이 남지 않도록 멸균된 생리식염수로 세정한다.
- 2) 내부 트레이에서 보호용 뚜껑(lid)를 벗겨 트레이로부터 주입기구를 꺼낸다.
- 3) 주입기구의 마개를 제거한다.
- 4) 주입기구 몸통(syringe barrel)에 압력을 가하여 천천히 적용부위에 겔(gel)을 도포한다.
- 5) 적용부위에 완전히 도포될 수 있도록 충분히 투여한다.
- 6) 과도한 양의 겔(gel)이 투여 예정된 부위 이외의 조직에 접촉한다면 멸균 거즈로 겔(gel)을 닦아준다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용 멸균제품이므로 재사용을 금지한다.
- 2) 재멸균하여 사용하지 않는다.